

## MASQUE TEXTILE (LAVABLE ET REPASSABLE) UNS CAT.1 GRAND PUBLIC

CONFORME AU PROTOCOLE D'ESSAIS DÉCRIT DANS LE DOCUMENT DGA DU 29 MARS 2020 MASQUE CATÉGORIE 1 « UNS 1 » = MASQUE INDIVIDUEL À USAGE DES PROFESSIONNELS EN CONTACT AVEC LE PUBLIC. EFFICACITÉ DE FILTRATION DES PARTICULES DE 3 µM : > 90% RESPIRABILITÉ : ESSAI DE PERMÉABILITÉ À L'AIR > 96 L.M<sup>2</sup>.S-1 POUR UNE DÉPRESSION DE 100 PA



### COMMENT PORTER LE MASQUE ? HOW TO WEAR THE MASK ?



#### FRANÇAIS

1. Une fois les mains lavées, prenez le masque. le bord rigide vers le haut.

2. Placez le masque sur votre visage et attachez-le par les élastiques derrière les oreilles. L'étiquette doit être portée à l'intérieur du masque.

3. Moudrez le renfort rigide du haut du masque sur la racine du nez.

4. Abaissez le masque sous le menton.

#### ENGLISH

1. Once hands are washed, take the mask with the rigid edge up.

2. Place the mask on your face and attach it with the elastics behind the ears. The label must be worn inside the mask.

3. Mold the rigid reinforcement from the top of the mask on the root of the nose.

4. Lower the mask under the chin